

카트리지형주사기

첨부문서


- 허가번호: 제허 11-42 호
- 품목명: 카트리지형주사기
- 모델명: SAF1SUS, SAA1SUS, SAA1-W
- 포장단위: 1EA/BOX
- 사용목적: 1회용 카트리지형 마취액을 주입하는데 사용하는 국소마취용 주사기이다.
- 보관 또는 저장방법
 1. 환기가 잘되고 습기가 적은 서늘한 곳에 보관
 2. 상온에서 변형이 가지 않도록 하중을 피하여 개별 보관하도록 한다.
- 사용방법

가. 사용 전 준비사항

 1. 제품 외관의 현저한 변형이나 핀 홀, 이물질 부착 등을 확인하여야 한다.
 2. 본 제품을 처음 사용하는 경우에는 포장용기에서 꺼내어 외관 및 작동(roding)을 확인한다.
 3. 멸균(고압증기멸균: 132°C에서 15분간 멸균, 30분간 건조한다.)
 - 멸균 시 설비 제조회사의 멸균방법과 사용방법을 준수하도록 한다.
 - 멸균과 건조 시 기구 간에 서로 접촉되지 않도록 배치하며, 반드시 멸균포를 사용하도록 한다.

나. 사용방법

 1. 병원 내 카트리지형주사기의 사용방법에 따른다.
 2. 사용도중 부식이나 크랙 등이 발견되거나 바닥에 떨어뜨렸을 경우 즉시 다른 기구로 대체하여 사용한다.
 3. 조작순서

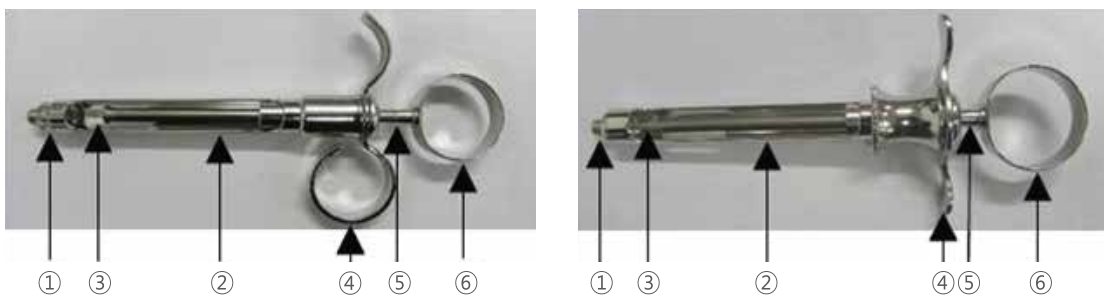

- a. 반드시 사용 전 살균 및 멸균소독이 이루어져야 한다.
- b. 텀브링(⑥)을 이용하여 로드(⑤)를 뒤쪽으로 끝까지 잡아당긴다.
- c. 마취용 카트리지를 배럴(②) 측면으로부터 끼워넣은 후 마취용 카트리지의 위치를 잡는다.



- d. 텀브링(⑥)을 앞쪽으로 밀어주어 하폰(③)이 마취용 카트리지의 고무마개에 꽂히도록 한다.
- e. 콘넥터(①)에 Needle의 장착은 Needle 제조자가 제공한 사용설명서에 따라 장착한다.
- f. 텀브링(⑥)을 이용하여 그립(④)에 힘을 가하여 로드(⑤)가 앞쪽으로 진행, 적정량의 마취액을 주입한다.
- g. 주입이 끝나면 장착된 Needle을 제거한다.
- h. 마취용 카트리지 제거는 배럴(②)에 넣을 때의 역순으로 빈 마취용 카트리지를 제거한다.
- i. 주사침은 일회용이므로 일단 사용한 것은 재사용하지 않는다.
- j. 시술이 끝난 후 사용된 폐기물은 정리하여 폐기한다.
- k. 시술 후 카트리지형 주사기는 반드시 살균 및 멸균소독이 이루어져야 한다.
- l. 직사광선이나 습기가 있는 장소를 피해 보관한다.

다. 사용 후 보관 및 관리방법

자체적으로 구입한 희석제와 함께 사용설명서에 따라 통상적인 살균소독제로 부품을 깨끗하게 살균 소독한다.
(교착부가 있는 제품의 경우, 모든 교착부를 완전히 열고 세척할 것)

• 사용 시 주의사항

- 1. 반드시 사용 전 살균 및 멸균소독이 이루어져야 한다.
- 2. 주사침은 일회용이므로 일단 사용한 것은 재사용하지 않는다.
- 3. 시술이 끝난 후 사용된 폐기물을 정리하여 폐기한다.
- 4. 직사광선이나 습기가 있는 장소를 피해 보관한다.

• 제조업자의 상호와 주소
(주)오성엠앤디

경기도 김포시 양촌읍 황금로 109번길 57

☎ 031-987-5395

• 본 제품은 의료기기 임

문서작성연월: 2017.10.27.(Rev.02)

